

Вертикализираща електрическа инвалидна количка KY139

Ръководство на потребителя

Вертикализираща електрическа инвалидна количка KY139

(1) Този модел вертикализираща електрическа инвалидна количка използва електрически механизъм за изправяне на седалката, позволяващ на ползвателя самостоятелно да се изправи без чужда помощ, като в същото време спомогне и за:

- ① Насърчаването на кръвообращението, подобряване на сърдечната и белодробна функции;
- ② Предотвратяването на инфекции на пикочните пътища, намаляване на стреса и предотвратяване на появата на рани от залежаване;
- ③ Седене в количката за дълъг период от време, особено полезно и в случаите на повишено абдоминално налягане, подуване на корема, коремни болки, гадене и повръщане. Стоящата инвалидна количка може ефективно да намали тези физиологичните проблеми.

Редовните рехабилитационни упражнения могат не само да забавят влошаването на остеопороза, но също засилват дейността на ставите, намаляват мускулната атрофия.

В допълнение към горните функции на инвалидната количка, тя спомага и множество дейности от ежедневието като достигане на високи предмети, теглене на банкомат, използване на гишета и пр. Не по-малко важна употреба намира и в социалните интеракции на ползвателя и социалните и обществени интеракции.

Вертикализиращата количка KY139 е усъвършенствама електрическа инвалидна количка от "изправен" вид, като основните ѝ предимства са нейната висока приложимост, достъпна цена и функционалност. Електрическата инвалидна количка може да се употребява пълноценно от пациенти с параплегия, хемиплегия и слабост на долните крайници, облекчавайки движението им в ежедневните им и служебни дейности.

(2) Функцията за изправяне е предназначена спомогне състояния, засягащи долните крайници, коляното и прасеца (когато по него няма лезии).

Количката не подходяща за употреба в следните случаи:

- ① За ползватели, които трудно стоят в седнала позиция и такива със силно изразена слабост в долните крайници;
- ② За ползватели с невъзможност на долните крайници да поддържат тежестта на тялото.
- ③ За ползватели с фрактура на долен крайник;
- ④ За ползватели с разстояние от центъра на коляното до петата по-малко от 45 см;
- ⑤ За ползватели със слабост на горните крайници или липса на горни крайници, както и ако горните крайници не могат да контролират работата на контролера;
- ⑥ За ползватели с невъзможност гръмначният стълб да поддържа тежестта на тялото;
- ⑦ За деца;
- ⑧ За ползватели без усещане в долните крайници.

Забележка: не използвайте вертикализиращата функция върху наклони и неравни пътища. Моля, затворете контролера, когато инвалидната количка е изправена!!!

Почивайте на всеки 30 минути от използването на вертикализацията за поне 10 минути, така че частите на прасеца да възстановят кръвообращението.

(3) Характеристики на продукта

- Висококачествена стоманена заварка, красива и компактна структура, здрава и издръжлива;
- Регулируем педал, подходящ за индивидуална настройка;
- Заден подлакътник, подкрачник, възможност за лесно използване на други съоръжения, докато се ползва количката;
- Възглавница на седалката, изработена от здрава мрежеста тъкан с високо еластична пяна, ергономично оформена възглавницата;
- Предпазани наколенки - намираща се специфично в ключовата точка при изправяне. Наколенките са изработени от специална структура тип ръчна катарам, проста, но и в същото време - удобна. В допълнение, структурата им съдържа и вискоеластична гъба и дишаща тъкан;
- Предните и задните колела са изработени от надуваема плътна гума с шарка и протектора с уникален дизайн и сцепление. Усъвършенствана спирачна система, целяща прецизност преди всичко;
- Моторът е стабилен, тих и енергоспестяващ; електрическият тласкач е с нисък шум и голяма тяга
- Капацитет на батерията: 28AH, пробег до 20 км;
- Стабилно и гъвкаво управление с контролер с британски механизъм, създаващ най-доброто усещане за контрол.

(4) Работа на продукта

(a) Метод на използване на контролера

Забележка: моля, не използвайте функцията за стоене на неравни повърхности. Когато инвалидната количка е изправена или потребителят се движи, моля, изключете контролера!

За да стартирате контролера, моля, щракнете върху ЗАХРАНВАНЕ, дисплеят ще покаже нивото на хранване, а КЛАКСОНЪТ ще издадае звуков сигнал, ИДНИКАТОР НА ДИСПЛЕЯ ЗА СКОРОСТТА. Удбони за ползване бутони за намаляване и увеличаване на скоростта. Лесно управление на посоката и скоростта.

II Режим и функциониране на функцията за вертикализиране

Режим за отваряне на наколенките

Режим за затваряне на наколенките

Лента за петата, функция за закопчаване напредпазния колан, подложка за коляното.

Моля, следвайте следните стъпки при използване функцията за вертикализиране:

- ① Първо, отворете придържащата наколенката;
- ② Завъртете наколенката наляво и надясно;
- ③ Прасецът застава зад наколенника и се регулира на подходящото място;
- ④ Дръжката се закопчава, двете ръце завъртат наколенниците, за да потвърдят дали дръжката е закопчана;

- ⑤ Закопчайте предпазния колан на наколенките;
- ⑥ С ръка издърпайте предпазния колан, за да се уверите дали е закопчан;
- ⑦ Използвайте горния предпазен колан, за да фиксирате на гърдите. Уверете се, че велкрото и ключалката на предпазния колан са добре положени;
- ⑧ Използвайте на контролера, за да повдигнете седалката;
- ⑨ След като се издигнете до максималната височина, изключете контролера;
- ⑩ Моля, използвайте контролера, за да пуснете седалката и преди да премахнете подложката за коляното, моля, уверете се, че седалката се е спуснала до минималната височина.

Отстранете подложката за коляното, като отворете предпазния колан.

Ако прасецът е твърде стегнат, можете да регулирате колана на петата, така че прасеца да е малко назад.

Ако наколенката е твърде висока или твърде ниска, моля, издърпайте оформената катарамата. Можете да я пристегнете през три различни дупки, за да регулирате височината на наколенката. Достига се то удобна за тялото височина на седалката и облегалката.

Регулирайте бедрата, обратно в удобно състояние. Ако не се нуждаете от функцията за изправено положение, можете да премахнете подложката за коляното, за да карате инвалидната количка да ходи.

Когато използвате функция за изправено положение, имайте предвид:

- ① Ако като височината на наколенката или U-размерът ѝ не са подходящи за употреба, моля, обадете се на нашия отдел за обслужване на клиенти или технически отдел, не принуждавайте потребителя да опитва да я използва!
- ② Не отваряйте горния предпазен колан, предпазния колан и бутон на дръжката, когато седалката не е напълно намалена, което е изключително опасно и може да причини нараняване на потребителя!
- ③ Ако функцията за вертикализиране не функционира правилно или издава необичайни звуци, моля, не продължавайте да използвате количката и се свържете с вашия дистрибутор.

III. Основни технически параметри

	Размер		Размер
Обща дължина	92 см	Напрежение	24V
Обща ширина	59 см	Батерия	24V 28AH X 2
Височина в седеж	96 см	Мощност двигател	200W X 2
Височина изправена поз.	144 см	Контреолер	PG-VR2 PM60-A1
Широчина седака	46 см	Зарядно	HP8204B 24V/5A
Дълбочина седалка	43 см	Скорост	1-8km/h
Височина седалка от пода	52 см	Наклон	12°
Разстояние между подлакътници	45 см	Препятствия	до 4 см

В. Гумите не попадат в обхвата на гаранцията

Г. Потребителят не е спазвал инструкциите за употреба в това ръководство, което е довело до повреди за уреда.

Д. Непреодолима сила или злополука (включително, но не само пожар, наводнение, земетресение, автомобилна катастрофа и др.)

Е. Естествено износване, външни повреди, лоша поддръжка на инвалидната количка, причинена от повреда включително:

- ① Деформация на възглавницата на седалката в процеса на използване;
- ② Лагерите поради намокряне или несмазване с масло;
- ③ Напукване и повреда на тъканта на дръжките (тази част е с гаранция от три месеца);
- ④ Задвижващото колело е разхлабено и счупено;
- ⑤ Обезцветяване на металните части;
- ⑥ Изтриване на подвижните части или повърхностни драскотини или промяна на цвета на покритието;
- ⑦ Деформация на рамката, причинена от удари, сблъсък или счупване.