

IGO2 МОБИЛЕН КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР

СЪДЪРЖАНИЕ В КОМПЕКТА

1. МОБИЛЕН КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР DRIVE IGO2
2. БАТЕРИЯ
3. КАЛЪФ С ПРЕЗРАМКА
4. ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
5. КАБЕЛ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК
6. ЗАРЯДНО ЗА ПРАВ ТОК
7. ИНСТРУКЦИИ



ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

USB ПОРТ(САМОЗА СЕРВИЗ)

ИЗВОД ЗА КАНЮЛА

ИЗХОДНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ



ВНИМАНИЕ
ПРИ РАБОТА,ТЕМПЕРАТУРАТА НА
ВЪЗДУХА ДОСТИГА ДО 57 ГРАДУСА
ПАЗЕТЕ КОЖАТА СИ ОТ ИЗГЯРЯНЕ



БАТЕРИЯ/ СЛОТ ЗА БАТЕРИЯ

БУКСА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НОРМАЛНО НИВО
НА КИСЛОРОД

НИСКО НИВО
НА КИСЛОРОД

СЕРВИЗ



НАЧАЛЕН ЕКРАН

НИВО КИСЛОРОД НАДОЛУ

НИВО КИСЛОРОД НАГОРЕ

НАСТРОЙКА
СТАНДАРТЕН РЕЖИМ



СМАРТ РЕЖИМ

СИМВОЛ ЗА
ВКЛ/ИЗКЛ
ЗВУКОВ
СИГНАЛ

БУТОН
ЗАХРАНВАНЕ



ИНДИКАТОР ЗА
ЗАРЕЖДАНЕ

СТАТУС НА
БАТЕРИЯТА

БАТЕРИЯ

БАТЕРИЯ

КАПАК



КОНТАКТНИ ПИНОВЕ

ИНДИКАТОР ЗА НИВО

БУТОН ЗА ПРОВЕРКА НА ЗАРЯДА



КАЛЪФ

ОТВОР ЗА
КАНЮЛА

ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ



ДЖОБ ЗА РЕЗЕРВНА
БАТЕРИЯ

ПРЕЗРАМКА

ЦИП



ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

1. Разопакувайте устройството и всички компоненти.
2. Устройството е в калъф. Свалете ципа за достъп до гнездото за батерията
3. Отворете батерията от кутията и я поставете в устройството
4. Закачете колана на халките на калъфа.
5. Свържете зарядното към парата за зареждане на батерията.
6. Свържете канюлата към конектора на устройството.
7. Устройството е готово за работа според предписанията

НАСТРОЙКА НА ДОЗАТА

Настройте дозировката на кислород с бутоните + и - за стандартен режим
За Смарт режим задръжте двата бутона за регулиране за 3 секунди
За да се върнете в стандартен режим задръжте отново бутоните

Смарт режима позволява на апарата да подава определено количество кислород, спрямо интензитета на дишането за минута време.



Таблица с обеми кислород при стандартна и Смарт настройка

НАСТРОЙКА	мл / мин	мл / вдишване 10/мин	мл / вдишване 20/мин	мл / вдишване 25/мин
1	260	26.0	13.0	10.4
2	440	44.0	22.0	17.6
3	725	72.5	36.3	29.0
4	880	88.0	44.0	35.2
5	1014	101.4	50.7	40.6