

ПРЕДПАЗНА МАСКА РЕСПИРАТОР - М-9520А (FFP2 NR) ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Има на продукт	Респираторна лицева маска		
Модел	M-9520A		
Снимка			
Предназначена за употреба като	Респираторна маска, предназначена е да намали излагането на потребителя към някои пренасяни по въздушно капков път частици, (твърди и течни аерозоли) които са опасни за здравето.		
Справка за стандартите, на които отговаря продукта	EN 149:2001+A1: 2009	Класификация	FFP2 NR
Справка за регулатията на продукта	Регулация (ЕС) 2016/425 на Европейския Парламент и Европейския съвет		
Компоненти	Тяло на лицева маска, назална щипка, подложка, презрамки за ухо		
Материали	Полипропилен, не вълнени материали		
Характеристики	 Максимално проникване на тестов аерозол: <6% Цялостна вътрешна пропускливост (TIL): <8% Съпротивление на вдишване: < 70Pa при 30 l/min, <240 Pa при 95 l/min Съпротивление при вдишване: < 300 Pa при 160 l/min		
Необходима инспекция непосредствено преди употреба	Преди употреба, проверете датата на складиране отбелязана върху опаковката, проверете за механични наранявания върху повърхността на маската, дали целостта на маската не е нарушена и дали маската не е била замърсена. Маски с нарушение по целостта и такива с изтекъл срок на съхранение не могат да бъдат използвани.		
Инструкция за поставяне	1. Захванете ластиците на маската с пръсти и я поднесете към лицето. Уверете се, че скобата е в горния край на маската, над носа. 2. Поставете маската върху лицето и закрепете ластиците зад ушите. 3. Притиснете скобата, за да уплътните добре пространството около носа. 4. Ако е нужно, притиснете маската, така че тя да прилепне още по-плътно към лицето, за да сведете изтиchanето до минимум. Ако не можете да постигнете правилно уплътнение, не навлизайте в заразена среда!		
Период на употреба	Препоръчителни са по-малко от 8 часа.		

Ограничения	<ol style="list-style-type: none">1. Продуктът не е стерилен, моля не използвайте в среда където е необходима стерилност..2. Не предпазва респираторната система срещу аерозоли съдържащи радиоактивни частици, вируси и ензими.
Внимание	<ol style="list-style-type: none">1. Този респиратор предпазва от определени заразители, но той не елиминира излагането ви или рисъкът от зараза с някои болести или инфекции. Моля прочетете внимателно и цялостно инструкцията за употреба и я пазете. Никога не използвайте продукта извън обхвата на способностите му за предпазване. На знанието на потребителите е обърнато внимание за това, че дори тестван и сертифициран продукт, отговарящ на един или няколко стандарта никога не може да гарантира пълна защита на потребителя от евентуалните рискове за зараза. Винаги четете рисковете и ограниченията за употреба на продукта. Неспазването на инструкциите и ограниченията за употреба на продукта могат да намалят ефективността на респиратора и да доведат до болест или смърт. За правилна употреба, обърнете се към отговорникът, потребителските инструкции или се обърнете към отдел за безопасност на труда за допълнителни инструкции.2. Този продукт не доставя кислород. Използвайте само в адекватно вентилирани помещения, съдържащи достатъчно количество кислород.3. Не използвайте когато концентрацията на замърсителите представлява непосредствена опасност за здравето и живота.4. Не използвайте в експлозивна среда.5. Прекратете незабавно работата си и излезте на чист въздух ако (а) имате затруднено дишане (б) или сте замаян или усетите някакъв друг дискомфорт.6. Окосмяването по лицето, брадата или други лицеви характеристики могат да намалят ефективността на респиратора.7. Никога не променяйте или модифицирайте респиратора по какъвто и да е начин.
Срок на годност	Три години
Условия на съхранение	Съхранявайте на сухо място при стайна температура и далеч от директна слънчева светлина.
Производител	Компания: Trust Loyalty & Glory Epoch

 Adapt.bg За по-добър живот!	Network Technology Co., Ltd. Адрес: Китай, провинция Дзянсу, град Суджоу, Индустриски парк Суджоу Уебсайт: mainage.com Тел. 512-62607604 / 86-18113696750 Имейл: xia.ge@falab.cn
Европейски представител и пълномощник	Lotus NL B. V. Адрес: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
Надзорно тяло отговорно за оценката на съответствието и наблюдението на продукта:	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam Notified Body No. NB 2797

ПРЕДПАЗНА МАСКА РЕСПИРАТОР - KN95

www.adapt.bg